

●界面活性剤や色素不使用、過炭酸ナトリウム主成分のシンプルな入れ歯洗浄剤です。●入れ歯に付着した汚れやバイオフィスをしっかり落とします。●増粘剤や緩衝剤のために用いられる結晶剤などの余計な成分を配合していないので、すすぎも簡単です。

●使い方/使用量の目安

①お持ちのコップやケースに40℃のお湯を入れ、本品を小さじ1杯(約3g)を入れてください。②食べかすを取り、入れ歯をつけてください。通常の汚れは約5分で洗浄終了。より効果を求めたいときは、そのまま30～60分つけ置きしてください。③洗浄後は水でよくすすいでください。

●使用上の注意/禁忌処置

○特殊な素材(健康保険適用外など)で作られた入れ歯や部分入れ歯にはお使いいただけません。○乳幼児や判断力が低下した方の手の届かないところに置いてください。○用途外に使わないでください。○60℃以上の熱湯は使用しないでください。○直射日光を避け、高温多湿の場所に置かないでください。○目に入った時は、こすらず流水で十分に洗い流してください。○皮膚に付いた時はすぐに水で洗い流してください。○万一飲み込んだ時は、水を飲ませてください。○いずれも異常が残る場合は、医師に連絡し相談してください。※膨張による破裂防止のため、袋に空気穴を開けています。

- 品名: 入れ歯洗浄剤
- 用途: 入れ歯の洗浄
- 液性: 弱アルカリ性
- 成分: 過炭酸ナトリウム、クエン酸、炭酸水素ナトリウム
- 正味量: 160g(約53回分)



【発売元】

石けん百貨株式会社  
大阪府茨木市 4-4-19  
TEL: 072-646-5330  
石けん百貨 <http://www.live-science.co.jp>

日本製

